


Arvoisa Icare-silmänpainemittarien käyttäjä,

Suosittelimme anturin kannan (Kuva 1) vaihtamista puolen vuoden välein sujuvan käytön takaamiseksi. Anturin kantaan joutuu ilmasta rasvaa, hiukkasia ja kosteutta. Likainen anturin kanta hidastaa tai pysäyttää kertakäyttöisen anturin liikkeen ja aiheuttaa lopulta virheilmoituksen. Laitteen mukana on yksi varakanta suojausputkilossaan ja uusia saa jälleenmyyjältämme.

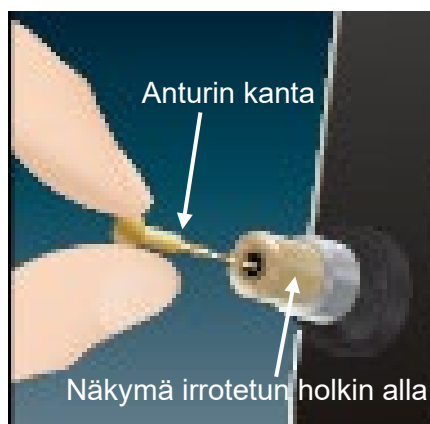

Kuva1. Anturin kantaan pääsee käsiksi kiertämällä ensin irti sitä paikallaan pitävä holkki.

Emme suosittele anturin kannan puhdistamista, koska emme voi valvoa tai taata puhdistuksen tulosta. Sen sijaan valvomme tuotannossamme, että uudet anturin kannat ovat laadukkaita.

Jos laite ilmoittaa virheen (Taulukko 1) useammin kuin kaksi kertaa peräkkäin anturin vaihtamisen jälkeen, vaihda anturin kanta ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.

Taulukko 1. Anturin kannan vaihtamistarvetta kuvaava virheilmoitus.

Laitemalli	Virheilmoitus
Icare TA01i	E01 tai E03
Icare ONE	CLEAN
Icare HOME	SERVICE
Icare PRO	Probe didn't move properly
Icare ic100	PUHDISTA VAIHDA
Icare ic200	VAIHDA

Ystävällisin terveisin,

Icare Finland Oy
Jouni Onnela
Tuotepäällikkö